


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMO O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO?

Abra a embalagem externa;
Retire o lacre em amarelo escrito puxe, com cuidado para não danificar o saco;
Desdobre a embalagem e abra o zíper de segurança localizado próximo ao bocal.
Aproxime a boca ou parte íntima até contato do bocal com a pele.
Após o uso lacre o zíper e descarte em local apropriado.

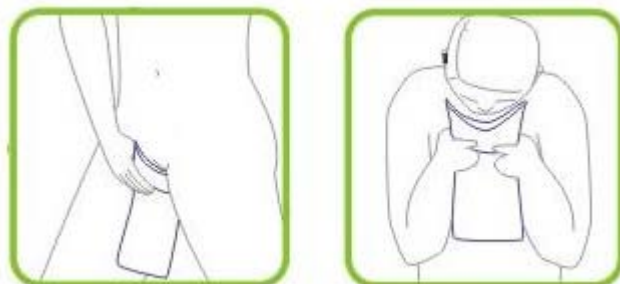

QUEM PODE UTILIZAR?

Homens e Mulheres independentes de faixa etária e condição física. No caso infantil e de deficientes que não possuam autonomia de segurar a embalagem, indicamos que o mesmo seja utilizado acompanhado de um responsável.

Aconselhamos que o mesmo seja utilizado em discrição para evitar atentado ao pudor e constrangimento ao usuário e/ou dos demais.

QUANDO UTILIZADO PARA O VÔMITO O BOCAL É PEQUENO?

Não. O bocal foi desenvolvido com o objetivo da pessoa que esta utilizando não visualizar o que esta sendo eliminado. No caso do vômito esta estratégia determina uma diminuição do enjôo pelo simples fato da pessoa não visualizar e nem sentir o odor do que esta sendo eliminado. Muitos locais e pessoas atualmente utilizam saco plástico, recipientes e comadre, no qual o usuário coloca a cabeça toda dentro do mesmo, o que ocasiona respingos e a sensação de desconforto ainda maior devido a aparência e odor.

COMO O TOALET DESCARTÁVEL PODERÁ AUXILIAR NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA?

- A incontinência urinária é a perda incontrolável da urina, sendo assim o paciente necessita de uma solução para evitar o desconforto de toda hora se deslocar até um banheiro ou o constrangimento de urinar na própria roupa. O Toalet Descartável pode ser transportado para todos os lugares de forma que a utilização se torna mais confortável e segura. Em alguns casos é necessária a utilização juntamente com sonda externa.

Os dois produtos poderão ser utilizados com o objetivo de facilitar e gerar conforto aos pacientes com problemas urinários ou mesmo aos cadeirantes ou acamados. O paciente que estiver com dreno interno o funcionamento é o mesmo.



ESCRITÓRIO:

Rua Garibaldi, 79 – Tijuca

Rio de Janeiro – RJ

CEP 20511-330

Tel.: (21) 3264-8340

www.toaletdescartavel.com

FÁBRICA:

Rua Projetada C, S/Nº - Lote 32

Condomínio Industrial da Barrinha - Três Rio – RJ

CEP 25804-970

sac@toaletdescartavel.com

QUAL É A FINALIDADE DO SUPORTE?



O suporte normalmente é disponibilizado para hospitais e lojas especializadas o qual serve para fixar o Toalet Descartável ao leito do paciente, na cadeira de rodas ou mesmo na calça do paciente, facilitando a utilização. Pode ser utilizado em conjunto com as sondas internas ou externas. Material desenvolvido para suportar a utilização do produto até sua capacidade máxima.

COMO O PRODUTO PODE SER UTILIZADO POR UM CADEIRANTE?

O Toalet Descartável deve ser utilizado devido à falta de banheiros adaptados e maior flexibilidade de utilização em diferentes ambientes ou quando o mesmo estiver acoplado a sonda para incontinência urinária, evitando a emissão de odores, barulho do líquido da urina durante o descolamento e fácil substituição e descarte. O mesmo gera mais autonomia aos pacientes lúcidos e com autonomia nos braços. Os demais devem utilizar com auxílio de um acompanhante.

O Toalet irá substituir bolsões de urina que frequentemente ocorre vazamento da mesma. Elimina o odor e o barulho do líquido durante o deslocamento. É descartável e de fácil portabilidade. Leve e discreto. Evita o constrangimento, pois a urina não fica visível. Não molha o ambiente. Otimiza os custos, além de ser mais higiênico.

ORIENTAÇÕES DE DESCARTE E GRUPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) GRUPO D

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como A1;
- sobras de alimentos e do preparo de alimentos;
- resto alimentar de refeitório;
- resíduos provenientes das áreas administrativas;
- resíduos de varrição, flores, podas e jardins;
- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

FONTE: <http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=13554>

QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE INGESTÃO DO PRODUTO?

O Toalet Descartável é atóxico e derivado de celulose, sendo assim a indicação é beber bastante água para hidratar o organismo. No caso de algum desconforto favor procurar orientação médica. Laudos técnicos realizados pelo Instituto Adolfo Lutz.

QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE CONTATO DO GEL COM OS OLHOS?

O Toalet Descartável é atóxico, sendo assim a indicação é lavar os olhos com água abundante. Não é aconselhável a utilização de colírios sem indicação médica. Caso a vermelhidão permanecer, favor procurar orientação médica. Laudos técnicos realizados pelo laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE CONTATO DO GEL COM A PELE?

O Toalet Descartável é atóxico, e não gera alergia. A indicação é lavar o local com água sem nenhum produto químico. Laudos técnicos realizados pelo Instituto Adolfo Lutz.

QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE ANIMAIS DESTRUIREM O SACO PLÁSTICO E INGESTIR O GEL?

O Toalet Descartável é atóxico e derivado de celulose, sendo assim a indicação é hidratar o animal e observar as fezes no caso de ingestão do plástico. Pode gerar vômito logo após a ingestão. Caso não ocorra favor não provocar a mesma. Se o animal apresentar algum comportamento diferenciado ou desconforto favor procurar orientação veterinária.

ESCRITÓRIO:

Rua Garibaldi, 79 – Tijuca

Rio de Janeiro – RJ

CEP 20511-330

Tel.: (21) 3264-8340

www.toaletdescartavel.com

FÁBRICA:

Rua Projetada C, S/Nº - Lote 32

Condomínio Industrial da Barrinha - Três Rio – RJ

CEP 25804-970

sac@toaletdescartavel.com